



Инструкция по применению:

- ▶ Трости
- ▶ Костыли
- ▶ Опоры-ходунки



Инструкция по применению изделий медицинского назначения

B.Well 
rehab

Костыли подмышечные **WR-311**

Костыли с опорой на предплечье **WR-321** и **WR-322**

Подмышечные костыли (модель **WR-311**) дают возможность полностью разгрузить больную или поврежденную конечность, перенося весь вес человеческого тела (нагрузку) на верхние конечности и плечевой пояс.

Костыли с опорой на предплечье (модели **WR-321** и **WR-322**) дают возможность равномерно перераспределить нагрузку с нижних конечностей на верхние, помогают сохранять равновесие во время движения.

- ▶ перераспределяют нагрузку с нижних конечностей
- ▶ увеличивают площадь опоры и устойчивость при ходьбе
- ▶ восстанавливают двигательную функцию

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ▶ материал ствола – алюминий
- ▶ мягкие анатомические насадки для смягчения нагрузок на подмышечную область и лучезапястные суставы (модель WR-311)
- ▶ двойная регулировка высоты с помощью кнопочной конструкции: для положения подмышечного валика и ручки. Шаг 2,5 см. (модель WR-311)
- ▶ регулировка высоты верхней секции и высоты shaft, шаг 2,5 см (модель WR-321)
- ▶ стандартизированная манжета эргономичной формы (модель WR-322)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	WR-311S	WR-311M	WR-311L	WR-321	WR-322
Регулировка по высоте, см	95-115 ± 5%	115-135 ± 5%	135-155 ± 5%	85-116 ± 5%	95-118 ± 5%
Масса, кг	0,72 ± 5%	0,77 ± 5%	0,81 ± 5%	0,49 ± 5%	0,47 ± 5%
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	100	100	100	100	100
Минимальная длина верхней секции, см	-	-	-	23	34
Максимальная длина верхней секции, см	-	-	-	31	34
Минимальная длина нижней секции, см	-	-	-	62	61
Максимальная длина нижней секции, см	-	-	-	85	84

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для пациентов с нарушенной способностью к активному самостоятельному передвижению: ортопедо-травматологического или неврологического профиля.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

- ▶ Для облегчения при передвижении инвалидов и больных, имеющих повреждения и заболевания нижних конечностей, пользующихся ортезами и протезами
- ▶ Для лиц пожилого возраста с целью разгрузки суставов
- ▶ Для больных в период реабилитации после операций
- ▶ Для реабилитации после переломов конечностей

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Невозможность координации движений тела, головокружение, сонливость.

ПОДБОР ПОДМЫШЕЧНЫХ КОСТЫЛЕЙ:	ПОДБОР КОСТЫЛЕЙ С ОПОРОЙ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ (КОСТЫЛЕЙ-КАНАДОК):												
<p>Размер костылей подбирается по росту и весу.</p> <table border="1" data-bbox="70 699 508 863"><thead><tr><th>Размер</th><th>Рост, см</th><th>Мах вес, кг</th></tr></thead><tbody><tr><td>S</td><td>140-160</td><td>90</td></tr><tr><td>M</td><td>160-180</td><td>110</td></tr><tr><td>L</td><td>180-200</td><td>120</td></tr></tbody></table> <p>С помощью кнопочной конструкции длину костыля фиксируют таким образом, чтобы подмышечная опора находилась на 4-5 см ниже подмышечной впадины. Предплечье должно плотно прижимать костыль к телу человека. Ручка должна находиться на уровне запястья руки.</p> <p>Рекомендуется пробное тестирование перед покупкой.</p>	Размер	Рост, см	Мах вес, кг	S	140-160	90	M	160-180	110	L	180-200	120	<p>1 СПОСОБ</p> <p>Подбирая костыли с опорой на предплечье, нужно правильно отрегулировать положение ручки и удерживающей манжеты.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Просуньте руку в манжету▶ Поставьте костыль на расстоянии 15 см от стопы.▶ Для обеспечения оптимального распределения нагрузки на кисть локоть должен быть согнут под углом 15-20 градусов.▶ Правильное положение манжеты при росте 170 см на расстоянии 5-7 см от самой острой точки локтя. При росте от 182 см и выше на расстоянии 10 см от края локтя. При росте 150 см и ниже данная величина сокращается до 4,5-5 см. <p>2 СПОСОБ</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Встаньте прямо и свободно опустите руки.▶ Линия изгиба запястья должна совпадать с верхним уровнем рукоятки. Рекомендуется пробное тестирование перед покупкой.
Размер	Рост, см	Мах вес, кг											
S	140-160	90											
M	160-180	110											
L	180-200	120											

ПОДБОР ПОДМЫШЕЧНЫХ КОСТЫЛЕЙ:



ПОДБОР КОСТЫЛЕЙ С ОПОРОЙ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ:



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

WR-311

Локти согнуты под углом 25-30°. Наконечники костылей перемещают на расстояние примерно 15 см от передней части стопы и, опираясь на костыли, переносят тело.

WR-321/WR-322

Во время ходьбы наконечники костылей ставят примерно на 30 см вперед и 15 см вбок от стопы. Если у пациента довольно широкие бедра, костыли нужно отводить дальше в сторону, чтобы положение тела было более устойчивым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Проверяйте состояние насадки перед использованием костылей. Рекомендуется заменить насадку в случае ее износа.

Подмышечные костыли WR-311 рекомендуется использовать в течение относительно короткого периода (не более 1-1,5 мес.) вследствие повышенной нагрузки на плечевой пояс.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Костыли можно очищать мыльным раствором без применения абразивных чистящих средств. Следует избегать продолжительного контакта костылей с водой во избежание старения и коррозии материалов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Температура хранения и транспортировки: от - 40°C до + 40°C

Не подвергать воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ: В соответствии с принятыми законодательными нормами.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

WR-311

Костыли 2 шт., паспорт и инструкция по применению

WR-321/WR-322

Костыль 1 шт., паспорт и инструкция по применению

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ: Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ (номер и дату РУ смотрите на стикере на товаре), декларация о соответствии.