


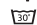

Правила ухода:

 Стирайте компрессионные изделия вручную или в стиральной машинке в деликатном режиме при температуре не выше 30° C*

 Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки

 Запрещается гладить изделия

 Сушите компрессионные изделия в прохладном месте, избегая нагревательных приборов

Для сохранения медицинских свойств и удаления загрязнений рекомендуется ежедневная стирка. В случае отсутствия условий или возможностей для регулярной стирки рекомендуется приобрести сменную пару. Для стирки рекомендуется использовать жидкое, нейтральное моющее средство


Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Дата производства изделия: указана на этикетке в номере партии «Lot»: последние шесть цифр обозначают год и месяц производства.


Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации. Адрес производителя и место производства указаны на упаковке.


Соответствие стандартам: Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2013/928 от 29.05.2017 года. Декларация о соответствии.


Расшифровка символов, применяемых на упаковке:


 Знак соответствия. На продукцию оформлена декларация о соответствии

 Сертификация CE

 Соответствие международным стандартам качества

 Соответствие стандарту безопасности в текстильном производстве

 Обратитесь к инструкции по применению

 Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами

 Не содержит латекс

 Производитель

 Модель

 Код партии

Гарантийный срок:

6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).

Гарантийными случаями не являются:

▶ механические повреждения (включая случайные)

▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению

▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделиями

▶ несанкционированные внесения изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия медицинские компрессионные:

Чулки JW-214 · Чулки JW-224

противоэмболические

Серия CARE: необходимая забота в ответственный период

Компрессионный трикотаж B.Well rehab серии CARE предназначен для снижения риска развития венозных тромбозомболических осложнений (ВТЭО), в том числе тромбозомболии легочных артерий, во время и после стационарного лечения и у лежачих больных:

- ▶ I class: JW-214 для пациентов с низкой и умеренной степенью риска ВТЭО
- ▶ II class: JW-224 для пациентов с умеренной и высокой степенью риска ВТЭО

Механизм действия компрессионного трикотажа основан на распределенном давлении: давление максимально в области щиколотки, уменьшается в области голени, минимально в области бедер. Все изделия проходят проверку на медицинскую эффективность согласно Британскому стандарту BS 6612.

Особенности:

- ▶ градуированная компрессия задана компьютерным способом
- ▶ специальная вязка сохраняет естественный влаго- и теплообмен кожи
- ▶ изделия легко надевать даже на лежащего пациента
- ▶ отверстие под пальцами позволяет контролировать состояние кожных покровов

Показания:

I class · 18-22 мм рт.ст.

- ▶ Компрессионная терапия во время и после операций
- ▶ Роды и послеродовой период
- ▶ Длительный постельный режим у ослабленных пациентов
- ▶ Пребывание в отделении интенсивной терапии и реанимации

II class · 22-32 мм рт.ст.

- ▶ Во время и после операций при наличии заболеваний вен в анамнезе
- ▶ Оперативные вмешательства на венах ног
- ▶ Компрессионная терапия после флебосклерозирования
- ▶ Малоподвижные пациенты с венозной патологией ног
- ▶ Роды и послеродовой период у женщин с заболеваниями вен

Противопоказания:

- ▶ септические заболевания вен и мягких тканей
- ▶ сердечно-легочная недостаточность
- ▶ трофические язвы нижних конечностей

IM_JW_CARE_2_RU_A6_4447



www.bwell-swiss.ch

* допускается паровая стерилизация при температуре 75° C

⚠ Предупреждения

Перед покупкой компрессионного трикотажа рекомендуется консультация врача. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть аллергическая предрасположенность к компонентам, входящим в состав материала.

Порядок надевания:

Чулки рекомендуется надевать до операции или родов.

Менять чулки лучше с утра.

Перед надеванием проверьте, чтобы руки надевающего чулки человека были подготовлены: отсутствие колец на пальцах, аккуратно подстриженные ногти, отсутствие заусенцев.

По возможности рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками.

1. Соберите изделие до пятки.

Аккуратно натяните на ступню.



2. Проверьте правильность расположения пятки и отверстия под пальцами.



3. Постепенно надевайте трикотажное изделие разглаживающими движениями



4. Равномерно расправьте изделие по ноге, разглаживая складки. Следите, чтобы изделие не перекручивалось



Режим ношения:

Чулки следует надевать перед операцией или родами и использовать в течение всего времени пребывания в стационаре, если иное не рекомендовано врачом. Чулки не снимаются на ночь.

Если Вы снимаете изделие в течение дня, рекомендуется надевать его снова после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении.

Комплектность:

▶ чулки – 1 пара в упаковке, инструкция

Правила подбора:

Чтобы облегчить и упростить подбор необходимого размера трикотажа специалисты B.Well Swiss рекомендуют пользоваться росто-весовой таблицей.



Компрессионный трикотаж B.Well rehab также можно подобрать, используя таблицу, основанную на индивидуальных измерениях.

Такие измерения лучше проводить с утра, до появления отеков.

Таблица измерений для подбора размеров чулок

Измерение, сантиметры	Размер ступни	Окружность самой узкой части голени над лодыжками	Окружность голени в самом широком месте	Окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)	Длина от пола до ягодичной складки	
1	до 23	до 20	до 33	до 56	до 72	
2	23-24	20-23	30-37	45-61	до 75	
3	24-26	23-26	33-40	50-64	до 78	
4	26-27	26-28	35-43	56-71	до 81	
5	от 27	от 27	от 42	от 64	до 83	

Маркировка размера на изделиях цветными отверстиями

1 – зеленый, 2 – красный, 3 – оранжевый, 4 – фиолетовый, 5 – голубой

Состав*:

Наименование изделия	Класс компрессии	Состав
Изделия медицинские компрессионные: Чулки JW-214 противоэмболические	I class, 18-22 мм рт. ст.	74% Полиамид 26% Эластан
Изделия медицинские компрессионные: Чулки JW-224 противоэмболические	II class, 22-32 мм рт. ст.	74% Полиамид 26% Эластан

* чулки содержат силикон