

Корсет ортопедический W-141

на поясничный отдел

Правила ухода:

Перед стиркой рекомендуется застегнуть все застёжки

-  Стирать вручную
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Расшифровка символов с упаковки:

-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель
-  Беречь от влаги
-  Беречь от солнечных лучей
-  Температура применения от -40°C до +40°C
-  Хранить при температуре от -20°C до +50°C

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.



Корсет ортопедический, мягкий, арт. W-141, уменьшает болевой синдром в поясничном отделе за счет:

- ▶ устранения дисбаланса паравертебральных и поясничных мышц
- ▶ стабилизации поясничного отдела позвоночника
- ▶ разгрузки поясничного отдела позвоночника

Гибкие ребра жесткости снимают мышечное напряжение, система фиксирующих ремней позволяет ограничить резкие движения в позвоночнике и предупредить появление боли.

Тонкий воздухопроницаемый гипоаллергенный комфортный материал позволяет носить корсет под обычной одеждой. Высота спинки корсета 20 см.

Размер корсета подбирается по окружности талии

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для корсетов на основании статистических данных:

Размер корсета	Размер одежды	Окружность талии
S	42-44	62-72 см
M	46-48	72-82 см
L	48-50	82-93 см
XL	50-52	93-103 см
XXL	52-54	103-113 см



Порядок надевания:

Пояс корсета застегивается при помощи застёжек «Велкро». Степень воздействия на поясничный отдел регулируется при помощи системы фиксирующих ремней.

Режим ношения:

По рекомендации врача или профилактический при возникновении болей в поясничном отделе позвоночника.

Рекомендуется примерить корсет, особенно в пограничных случаях.

Показания:

- ▶ уменьшает боль в поясничном отделе при миозитах, люмбагиях, нарушениях тонуса мышц
- ▶ рекомендуется для профилактики травм и обострений заболеваний при нагрузках
- ▶ стабилизирует позвоночник при функциональных нарушениях осанки, смещении позвонков (I степени)
- ▶ используется при опущении органов брюшной полости
- ▶ разгружает позвоночник после травм и операций
- ▶ замедляет прогрессирование дегенеративных заболеваний

Комплектность: корсет

Состав: 23% полиэстер, 52% нейлон, 10% спандекс, 10% эластик, 5% полиуретановый поролон, вкладные ребра жесткости

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Противопоказания:

- ▶ диафрагмальные грыжи
- ▶ синдром портальной гипертензии

Предупреждения:

при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе корсета, необходима предварительная консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание корсета может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия.

При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства