

## Бандаж на руку w-211

КОСЫНОЧНЫЙ

Серия MED

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж на руку, косыночный, арт. W-211, позволяет расположить руку в физиологическом положении, ограничить движения в суставах верхней конечности, обеспечить состояние покоя, необходимое для выздоровления.

- ▶ Используется как самостоятельный способ иммобилизации
- ▶ В сочетании с ортезами или жесткими фиксирующими повязками
- ▶ Уменьшает болевой синдром

Система фиксирующих ремней оптимизирует положение руки. Воздухопроницаемый гипоаллергенный комфортный материал позволяет носить бандаж в течение всего необходимого срока лечения.

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства

## Расшифровка символов с упаковки:



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Производитель



Модель



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Беречь от влаги



Беречь от солнечных лучей



Температура применения от -40 °С до +40 °С



Хранить при температуре от -20 °С до +50 °С

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.



www.bwell-swiss.ru

Размер бандажа подбирается по длине руки от локтя до основания пальцев или по росту

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для бандажей на основании статистических данных:

| Размер бандажа | Рост       | Длина руки от локтя до основания пальцев |
|----------------|------------|------------------------------------------|
| S              | 158-164 см | 30-33 см                                 |
| M              | 164-170 см | 33-36 см                                 |
| L              | 170-176 см | 36-39 см                                 |
| XL             | 176-182 см | 39-42 см                                 |



## Порядок надевания:

Наплечный ремень накиньте на плечо, противоположное травмированной руке. Руку поместите в муфту. Большой палец разместите в петле внутри муфты. Регулируя длину наплечного ремня, обеспечьте оптимальное положение руки. Закрепите длину наплечного ремня при помощи застежек-липучек «Велкро». Положение руки зафиксируйте с помощью дополнительного поясного ремня, проведя ремень через кольцо и закрепив его с помощью застежек.

**Режим ношения:** В течение дня, если иное не предписано врачом.

Рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

## Показания:

- ▶ поддержка руки при ушибах, после подвывихов, вывихов и переломов
- ▶ фиксация в физиологическом положении
- ▶ разгрузка суставов руки при повреждениях связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава
- ▶ при острых и хронических воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности (артриты, артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты)
- ▶ при неврологических патологиях (парезы и параличи верхней конечности)

**Комплектность:** бандаж на руку косыночный

**Состав:** 79% полиэстер, 5% хлопок, 6% нейлон, 10% полиформальдегид

**Гарантийный срок:** 6 месяцев на медицинские свойства

**Срок годности/службы** не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

## Противопоказания: не выявлены

**Предупреждения:** при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе бандажа, необходима предварительная консультация врача.

**Внимание:** слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

## Правила ухода:

- Стирать вручную
  - Температура не выше 30 °С
  - Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
  - Химчистка запрещена
  - Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
  - Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)
- Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.