

Бандаж

на коленный сустав W-332

усиленный

Серия PRO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж на коленный сустав усиленный, арт. W-332, предназначен для профилактики травм и заболеваний коленного сустава. Рекомендуется ношение бандажа при наличии факторов риска:

- ▶ нагрузках
- ▶ переохлаждении
- ▶ после перенесенных травм или инфекционных заболеваний
- ▶ людям с генетической предрасположенностью к заболеваниям коленного сустава
- ▶ при избыточном весе
- ▶ при вращательных нагрузках

Бандаж оказывает компрессионное воздействие на коленный сустав, способствуя улучшению кровообращения, уменьшению отека и снижению болевого синдрома.

3D технология вязки стимулирует проприоцептивный контроль и усиливает стабильность сустава.

Специальные вставки в области коленного сустава повторяют сложную динамику движения при ходьбе, улучшают посадку и прилегание бандажа к телу и дают ощущение комфорта.

Спиральные ребра жесткости снижают ударные нагрузки на сустав, предупреждают смещение бандажа при движении и способствуют боковой стабилизации сустава.

Размер бандажа подбирается по окружности ноги под коленом

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для бандажей на основании статистических данных.

Размер бандажа	Размер (мужской)	Размер (женский)	Обхват под коленом
S	46-48	44-46	27-30 см
M	48-50	46-48	30-33 см
L	50-52	48-50	33-36 см
XL	52-54	50-52	36-40 см
XXL	более 54	52-54	40-44 см

Порядок надевания:
Бандаж надеть так, чтобы спиральные ребра жесткости располагались по бокам коленного сустава.

Режим ношения:
Профилактический.
При подборе рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

Показания:

- ▶ профилактика травм
- ▶ уменьшение боли, отечности при травмах, растяжениях связок, ушибах
- ▶ профилактика развития и обострения заболеваний
- ▶ после перенесенных операций
- ▶ боковая нестабильность коленного сустава

Противопоказания: не выявлены

Предупреждения: при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе бандажа, необходима предварительная консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Комплектность:

бандаж на коленный сустав

Состав:

40% биокерамик,
10% лайкра, 27% нейлон,
23% эластик,
металлические
пружинные вставки

Гарантийный срок:

6 месяцев
на медицинские свойства

Срок годности/службы

не установлен и зависит
от интенсивности
эксплуатации.

Хранить в сухом месте при
комнатной температуре
вдали от прямых солнечных
лучей и влаги.

Правила ухода:

-  Стирать вручную.
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить.

Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства.

Расшифровка символов с упаковки:



Знак соответствия Российским Стандартам



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Производитель



Модель



www.bwell-swiss.ru