

Бандаж на голеностопный сустав W-347 регулируемый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж на голеностопный сустав, арт. W-347, позволяет фиксировать сустав, предупреждает подворачивание ноги, не ограничивает нормальные движения при ходьбе.

- ▶ Удерживает сустав в правильном положении
- ▶ Предупреждает повторные травмы, в том числе микротравмы
- ▶ Уменьшает отек и боль

Степень воздействия на сустав регулируется благодаря ленточной конструкции. Бандаж можно носить в обычной обуви.

Размер универсальный

Режим ношения:

Профилактический в течение всего дня, если иное не предписано врачом.

Порядок надевания: ногу проденьте в петлю так, чтобы лента оказалась с внешней стороны. Протяните ленту с внешней стороны через подъем на внутреннюю сторону, далее через стопу и зафиксируйте на лодыжке с помощью застежки-липучки «Велкро».

Показания:

- ▶ инверсионная травма (при подворачивании ноги вовнутрь)
- ▶ хроническая нестабильность сустава (слабость связочного аппарата)
- ▶ профилактика обострений и прогрессирования заболеваний (артрозов, артритов, тендинитов, тендовагинитов)
- ▶ уменьшение болевого синдрома и отека при травмах, ушибах, растяжениях связок, после оперативных вмешательств

Комплектность: бандаж на голеностопный сустав

Состав: 29% эластик, 58% нейлон, 13% полиэстер, вставки из алюминиевого сплава

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы
не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Противопоказания: не выявлены

Предупреждения: при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе бандажа, необходима предварительная консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание изделия может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. При появлении необычных симптомов следует прекратить его использование и обратиться к врачу.

Правила ухода: перед стиркой рекомендуется застегнуть все застежки



Стирать вручную



Температура не выше 30 °C



Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине



Химчистка запрещена



Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки



Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Расшифровка символов с упаковки:



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Производитель



Модель



Беречь от влаги



Беречь от солнечных лучей

Температура применения от -40 °C до +40 °C

Хранить при температуре от -20 °C до +50 °C