

ИЗДЕЛИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ:

B.Well 
rehab

Правила ухода:

Перед стиркой рекомендуется застегнуть все застёжки

-  Стирать вручную
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегать при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Расшифровка символов с упаковки:

-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель
-  Беречь от влаги
-  Беречь от солнечных лучей

 -40°C -40°C ПРИМЕНЕНИЕ
Температура применения от -40 °C до +40 °C

 -20°C -50°C ХРАНЕНИЕ
Хранить при температуре от -20 °C до +50 °C

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.



www.bwell-swiss.ru

Бандаж на брюшную стенку W-425 медицинский

Серия CARE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж на брюшную стенку, арт. W-425 предотвращает осложнения в период восстановления после операций (в том числе после лапароскопии) при астеническом и нормостеническом телосложении.

Ношение бандажа способствует поддержке тонуса мышц передней брюшной стенки.

- ▶ Мягко фиксирует шов
- ▶ Предотвращает перенапряжение мышц брюшной стенки
- ▶ Уменьшает риск возникновения грыж, в том числе в отдаленном периоде
- ▶ Уменьшает отек в мягких тканях
- ▶ Способствует снижению болевого синдрома

Мягкий эластичный перфорированный материал позволяет поддерживать комфортную температуру тела, нормальный влаго- и воздухообмен и обеспечивает поддерживающий и компрессионный эффект.

Пара гибких ребер жесткости предупреждает скручивание изделия и поддерживает мышцы при наклонах и во время движения, что позволяет рекомендовать бандаж в том числе активным и подвижным пациентам. Высота спинки бандажа составляет 24 см.

Комфортный клапан обеспечивает поддержку передней брюшной стенки и позволяет регулировать уровень компрессии на поверхность тела.

Размер бандажа подбирается по окружности талии

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для бандажей на основании статистических данных:

Размер бандажа	Размер	Окружность талии
S	42-44	62-72 см
M	46-48	72-82 см
L	48-50	82-92 см
XL	50-52	92-102 см
XXL	52-54	102-112 см



Порядок надевания:

Бандаж рекомендуется надевать лежа. Степень компрессии регулируется при помощи застёжек-липучек «Велкро».

Режим ношения:

Профилактический в течение дня, если иное не предписано врачом.

При подборе рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

Показания:

- ▶ поддержка и фиксация брюшной стенки
- ▶ восстановление в период после оперативных вмешательств на область брюшной полости, почек, а также после кесарева сечения
- ▶ профилактика образования послеоперационных грыж
- ▶ профилактика избыточного напряжения мышц в послеоперационном периоде
- ▶ послеродовой период
- ▶ состояние после липосакции

Комплектность: бандаж

Состав: 65,5% полиэстер, 24% нейлон, 10,5% спандекс, металлические пружинные вставки

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства

Противопоказания:

- ▶ беременность
- ▶ диафрагмальные грыжи
- ▶ невправимые грыжи брюшной стенки
- ▶ синдром портальной гипертензии
- ▶ воспаление швов
- ▶ заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся спастическими болями и вздутием живота

Предупреждения: при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе бандажа, необходима предварительная консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.