

Бандаж на область малого таза W-432 для беременных

Для фиксации органов малого таза в физиологичном положении

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж на область малого таза, арт. W-432, фиксирует органы малого таза в физиологически правильном положении.

- ▶ Помогает избежать переутомления во время беременности
- ▶ Компенсирует смещение центра тяжести и уменьшает боли в поясничном отделе позвоночника
- ▶ Снижает риск преждевременных родов
- ▶ Рекомендуется женщинам с генетической предрасположенностью к появлению растяжек

Бандаж выполнен из мягкого эластичного материала. Благодаря анатомичному крою и свойствам материала в бандаже удобно не только двигаться, но и сидеть.

Пара гибких ребер жесткости в области поясничного отдела позвоночника препятствует деформации и смещению бандажа во время движения.

Размер бандажа подбирается по окружности тела под животом

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для бандажа на основании статистических данных:

Размер бандажа	Размер	Окружность тела под животом
S	до 44	до 85 см
M	46-48	85-98 см
L	48-50	98-105 см
XL	50-52	105-115 см
XXL	52-54	115-126 см



Порядок надевания:

Живот должен располагаться над анатомическим вырезом.

Дополнительные фиксирующие ремни позволяют регулировать степень компрессии в течение всего срока беременности.

Режим ношения:

Профилактический, в течение дня, если иное не предписано врачом.

При подборе рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

Показания:

- ▶ Беременность со 2 триместра
- ▶ Поддержка и фиксация органов малого таза
- ▶ При ослаблении связок тазового кольца
- ▶ При болях в спине
- ▶ При предрасположенности к растяжкам
- ▶ Повторная беременность, угроза преждевременных родов

Комплектность: бандаж

Состав: 22% нейлон, 50% полиэстер, 18% эластан, 10% хлопок, металлические пружинные вставки

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации







Противопоказания: не выявлены

Предупреждения: при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, входящие в состав бандажа, необходима предварительная консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.






Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства

Правила ухода: перед стиркой рекомендуется застегнуть все застёжки

-  Стирать вручную
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Расшифровка символов с упаковки:

-  Знак соответствия Российским стандартам
-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Производитель
-  Модель
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.

