

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж на шейный отдел позвоночника, арт. W-121 стабилизирует и разгружает шейный отдел позвоночника:


- ▶ уменьшает проявление симптомов нарушения кровотока по позвоночным артериям (головные боли, головокружения)
- ▶ снижает напряжение мышц шеи и надплечья, снимая болевой синдром при остеохондрозе, шейном миозите, перегрузке шейной мускулатуры
- ▶ разгружает шейный отдел после травм и операций

Бандаж имеет анатомичный дизайн – специальную форму в области подбородка и гортани. Степень прилегания можно регулировать с помощью застежки «Велкро». Используются только гипоаллергенные, биологически инертные материалы.

Размер бандажа подбирается по высоте шеи или росту

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствия размеров для бандажей на основании статистических данных:

| Размер бандажа | Рост | Высота шеи |
|----------------|--------------|------------|
| S | до 165 см | до 8 см |
| M | 165 -170 см | 8-10 см |
| L | более 170 см | 10-12 см |


Порядок надевания:

Бандаж надевается на шею так, чтобы подбородок оказывался в специальной выемке, и фиксируется с помощью застежки «Велкро». Степень прилегания регулируется также с помощью застежки «Велкро».

Режим ношения:

По рекомендации врача или профилактический при возникновении болей в шее.

Рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

Показания:

- ▶ симптомы нарушения кровотока по позвоночным артериям (головные боли, головокружения)
- ▶ болевой синдром при остеохондрозе шейного отдела позвоночника
- ▶ шейный миозит, напряжение мышц шеи, надплечья
- ▶ реабилитация после травм и операций в области шейного отдела позвоночника

Комплектность: бандаж на шейный отдел позвоночника

Состав: 53% район, 3% спандекс, 4% нейлон, 40% полиуретановый поролон

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации






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
Противопоказания: не выявлены

Предупреждения: при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе бандажа, необходима предварительная консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует контролировать правильное расположение и посадку изделия.

При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Правила ухода:

-  Стирать вручную
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)