





## Правила ухода:

 Стирайте компрессионные изделия вручную или в стиральной машинке в деликатном режиме при температуре не выше 30° C

-  Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки
-  Запрещается гладить изделия
-  Сушите компрессионные изделия в прохладном месте, избегая нагревательных приборов

Для сохранения медицинских свойств и удаления загрязнений рекомендуется ежедневная стирка. В случае отсутствия условий или возможностей для регулярной стирки рекомендуется приобрести сменную пару. Для стирки рекомендуется использовать жидкое, нейтральное моющее средство

**Хранить** в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

**Дата производства изделия:** указана на этикетке в номере партии «Lot»: последние шесть цифр обозначают год и неделю производства. Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации.

**Соответствие стандартам:** Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2013/928 от 07.12.2017 года. Декларация о соответствии.

## Расшифровка символов, применяемых на упаковке:



Знак соответствия. На продукцию оформлена декларация о соответствии



Сертификация CE



Соответствие международным стандартам качества



Сделано в Европе



Соответствие стандарту безопасности в текстильном производстве



Обратитесь к инструкции по применению



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Не содержит латекс



Производитель



Модель



Код партии

## Гарантийный срок:

6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).

## Гарантийными случаями не являются:

- ▶ механические повреждения (включая случайные)
- ▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- ▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- ▶ любые внесения изменений в конструкцию

**Гарантия не распространяется на упаковку.**  
<sup>2</sup> допускается паровая стерилизация при температуре 75° C

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия медицинские компрессионные:

Чулки **JW-216**

Противоэмболические

**B.Well**   
rehab

## Серия CARE: Необходимая забота в ответственный период

Компрессионные чулки B.Well rehab JW-216 серии CARE используются для профилактики венозных тромбозомболических осложнений при операциях, родах, в том числе при кесаревом сечении, послеродовом и послеоперационном периодах, при длительном постельном режиме, после инфарктов, инсультов, травм, у ослабленных пациентов в малоподвижном состоянии.

Компрессионный трикотаж B.Well rehab серии CARE предназначен для снижения риска развития венозных тромбозомболических осложнений (ВТЭО), в том числе тромбозомболии легочных артерий:

- ▶ **I class: JW-216** для пациентов с низкой и умеренной степенью риска ВТЭО

Механизм действия компрессионного трикотажа основан на принципе распределенного давления: максимальное в области щиколотки, уменьшается в области голени, минимально в области бедра. Все изделия проходят проверку на медицинскую эффективность согласно Британскому стандарту BS 6612.

## Особенности:

- ▶ Максимальное давление в области щиколотки 18-22 mmHg
  - ▶ Технология «not rolling down» для удержания на ноге без силиконового нанесения
  - ▶ Антибактериальная обработка волокон от загрязнения и неприятных запахов
  - ▶ Контроль состояния кожных покровов через отверстие в подошвенной части
- Рекомендованы пациентам с чувствительной кожей или аллергией на силикон.

## Показания к применению трикотажа СЕРИИ CARE:

**Чулки противоэмболические 18-22 мм рт. ст.**

- ▶ Операции и послеоперационный период
- ▶ Роды и послеродовой период
- ▶ Длительный постельный режим у ослабленных пациентов
- ▶ Пребывание больного в отделении интенсивной терапии и реанимации

## Противопоказания:

- ▶ Септическое заболевание вен и мягких тканей
- ▶ Сердечно-легочная недостаточность
- ▶ Трофические язвы нижних конечностей

**B.Well Swiss AG**, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Производитель: **Би.Велл Свисс АГ**, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Место производства: Барселком Текстиль, С.А., Парк Индастриал Тамел С. Вериссимо, Лугар-да-Кашада, округ Брага, 4750-734 Барселуш – Португалия. Сделано в Португалии

**B.Well**   
rehab

www.bwell-swiss.ch



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

## ⚠ Предупреждения

Перед покупкой компрессионного трикотажа рекомендуется консультация врача. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть аллергическая предрасположенность к компонентам, входящим в состав материала.

## Порядок надевания:

Чулки рекомендуется надевать до операции и носить в течение всего пребывания в стационаре. Менять чулки лучше с утра.

Перед надеванием проверьте, чтобы руки надевающего чулки человека были подготовлены: отсутствие колец на пальцах, аккуратно подстриженные ногти, отсутствие заусенцев. По возможности рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками.


1. Соберите изделие до пятки. Аккуратно натяните на ступню.




3. Постепенно надевайте трикотажное изделие разглаживающими движениями



2. Проверьте правильность расположения пятки и отверстия под пальцами.

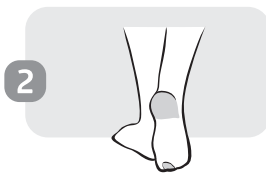

4. Равномерно расправьте изделие по ноге, разглаживая складки. Следите, чтобы изделие не перекручивалось

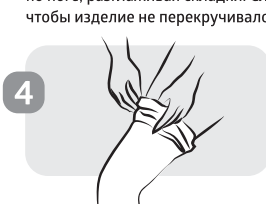

## Режим ношения:

Госпитальный трикотаж следует надевать перед операцией или родами и использовать в течение всего времени пребывания в стационаре, если иное не рекомендовано врачом.

Госпитальный трикотаж не снимается на ночь.

Если Вы снимаете изделие в течение дня, рекомендуется надевать его снова после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении.


## Комплектность:

- ▶ чулки – 1 пара в упаковке, инструкция

## Правила подбора:

Чтобы облегчить и упростить подбор необходимого размера специалисты V.Well Swiss разработали росто-весовую таблицу размеров, по которой можно в большинстве случаев подобрать правильный размер.

В ситуациях, когда невозможно воспользоваться данной таблицей, а также в пограничных случаях рекомендуется для точного выбора использовать таблицу подбора размеров, основанную на измерениях. Такие измерения лучше проводить с утра, до появления отеков.

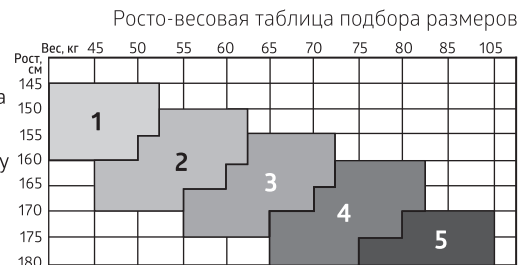

## ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ для ЖЕНСКИХ КОЛГОТОК, ЧУЛОК, ГОЛЬФОВ:

Измерение, сантиметры	Размер ступни	Окружность самой узкой части голени над лодыжками		Окружность голени в самом широком месте		Окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)		Длина от пола до ягодичной складки	
		a	b	c	g	A-G			
РАЗМЕР									
1	до 23	19-21	29-34	47-54	69-72				
2	23-24	21-23	32-37	52-62	71-75				
3	24-26	23-25	35-41	57-66	73-78				
4	26-27	25-28	39-45	60-70	76-81				
5	от 27	от 28	от 42	от 65	78-83				

## МАРКИРОВКА РАЗМЕРА НА ИЗДЕЛИЯХ ЦВЕТНОЙ ПОЛОСКОЙ

Чулки противоземболические:

## СОСТАВ:

1 – зеленый, 2 – красный, 3 – оранжевый, 4 – фиолетовый, 5 – голубой

Наименование изделия	Класс компрессии	Состав
Изделия медицинские компрессионные: Чулки JW-216 Противоземболические	18-22 мм рт. ст.	74% Полиамид 26% Эластан