

ИЗДЕЛИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ:

Корректор осанки W-132 P

для детей

B.Well 
rehab

Серия MED

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корректор осанки, арт. W-132 P, предназначен для формирования правильного мышечно-суставного стереотипа осанки и профилактики развития сколиоза.

- ▶ Удерживает позвоночник в правильном физиологичном положении
- ▶ Нормализует тонус мышц спины
- ▶ Снимает нагрузку с переднего опорного комплекса грудных позвонков
- ▶ Уменьшает болевой синдром

Корректор осанки оказывает дисциплинирующее действие, не вызывает мышечную гипотрофию. Пружинные вставки нормализуют тонус мышц. Корректор незаметен под обычной одеждой, выполнен из гипоаллергенного воздухопроницаемого материала.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре
вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Дата производства изделия указана на этикетке
в номере партии «LOT»:
первые две цифры – неделя производства,
следующие четыре цифры – год производства

Расшифровка символов с упаковки:

-  Знак соответствия Российским Стандартам
-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель

Размер корректора подбирается по окружности грудной клетки (измеряется на уровне подмышечных впадин)

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для корректоров на основании статистических данных:

Размер корректора	Рост ребенка	Окружность грудной клетки
S	116-122 см	55-62 см
M	128-134 см	62-70 см
L	140-146 см	Более 70 см



Рекомендуется примерить корректор, особенно в пограничных случаях.

Порядок надевания: корректор надеть по принципу рюкзака. Положение наплечных ремней зафиксировать при помощи хлястика на наружной части. Степень натяжения наплечных ремней можно регулировать.

Режим ношения: профилактический

- ▶ начинать с 1-1,5 часов
- ▶ в течение 2-х недель постепенно увеличивать время ношения до 6 часов
- ▶ в течение 2-х месяцев носить ежедневно на протяжении 4 – 6 часов
- ▶ постепенно в течение 2-х недель снизить время ношения до 1-1,5 часов

После 3-х месяцев ношения рекомендуется консультация у врача.

Показания:

- ▶ профилактика нарушений осанки
- ▶ нарушения осанки, сутулость, «вялая» спина
- ▶ искривления позвоночника в грудном отделе (кифоз, кифосколиоз, сколиоз)
- ▶ юношеские остеохондропатии позвоночника с болевым синдромом
- ▶ реабилитация после травм и операций в области грудного отдела позвоночника
- ▶ профилактика травм с локализацией в области грудного отдела позвоночника

Комплектность: корректор

Состав: 13% полиэстер, 58% нейлон, 29% эластик, металлические пружинные вставки

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Противопоказания:

- ▶ диафрагмальные грыжи

Предупреждения:

перед применением необходима консультация врача при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, находящиеся в составе материала. Рекомендуется наблюдение у врача в течение всего периода ношения корректора.

Правила ухода:

-  Стирать вручную. Перед стиркой рекомендуется вынуть ребра жесткости
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)



www.bwell-swiss.ch