






## Правила ухода:

-  Стирайте компрессионные изделия только вручную
-  Температура стирки не должна превышать 30°C
-  Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки
-  Запрещается гладить изделия
-  Сушите компрессионные изделия в прохладном месте, избегая нагревательных приборов

Для сохранения медицинских свойств и удаления загрязнений рекомендуется ежедневная стирка.

Для стирки рекомендуется использовать жидкое, нейтральное моющее средство.


**Хранить** в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

**Дата производства изделия:** указана на этикетке в номере партии «Lot»: последние шесть цифр обозначают год и неделю производства.


Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации.


**Соответствие стандартам:** Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2013/928 от 07.12.2017 года. Декларация о соответствии.


## Расшифровка символов, применяемых на упаковке:


 Знак соответствия. На продукцию оформлена декларация о соответствии


 Сертификация CE

 Соответствие международным стандартам качества

 Соответствие стандарту безопасности в текстильном производстве

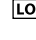
 Обратитесь к инструкции по применению

 Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами

 Не содержит латекс

 Производитель

 Модель

 Код партии

## Гарантийный срок:

6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).

## Гарантийными случаями не являются:

- ▶ механические повреждения (включая случайные)
- ▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- ▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- ▶ любые внесения изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**B.Well**   
rehab

Изделия медицинские компрессионные:

Чулки JW-215 • Колготки JW-315

### Серия PRO: профессиональный подход к профилактике отеков

Компрессионный трикотаж B.Well rehab серии PRO предназначен для улучшения венозного оттока при начальных стадиях заболеваний вен. Механизм действия компрессионного трикотажа основан на принципе распределенного давления: максимальное давление в области щиколотки 18-22 мм рт. ст., уменьшается в области голени, в области бедра компрессия минимальна.

Благодаря воздействию трикотажа на поверхностные вены:

- ▶ улучшается работа венозных клапанов
- ▶ перераспределяется кровоток в глубокие вены
- ▶ улучшается отток крови снизу-вверх

Все изделия проходят проверку на медицинскую эффективность согласно Британскому стандарту BS 6612.

## Особенности:

- ▶ анатомическая вязка «объемными сотами» с дополнительной нитью поддерживает естественный теплообмен кожи, обладает маскирующим эффектом
- ▶ комплексные нити с двойной S-образной оплеткой во встречных направлениях обеспечивают изделиям необходимый компрессионный эффект
- ▶ упругие и эластичные нити лайкры для комфортного контакта с кожей, хорошего прилегания, шелковистости и прочности
- ▶ усиленная пятка повышает прочность изделий и плотно фиксируется на стопе

## Показания (I class · 18-22 мм рт. ст.):

- ▶ профилактика варикозной болезни
- ▶ отеки к концу дня, тяжесть в ногах к вечеру
- ▶ боль, судороги, чувство онемения или «мурашек» в ногах
- ▶ «сосудистые звездочки» или выраженный сосудистый рисунок на коже ног
- ▶ наличие факторов риска: генетическая предрасположенность, прием контрацептивов, малоподвижный образ жизни, частые поездки и др.

## Противопоказания:

- ▶ септическое заболевание вен и мягких тканей
- ▶ сердечно-легочная недостаточность
- ▶ трофические язвы нижних конечностей

**B.Well Swiss AG**, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Производитель: **Би.Велл Свисс АГ**, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Место производства: Да Ю Энтерпрайз Ко., Лтд., №123, Сингонг 3-й проезд, Тяньхун Индустриал Парк, район Тяньхун, округ Чжанхуа, 52046, Тайвань, Китайская Республика. Сделано в Тайване.

**B.Well**   
rehab

www.bwell-swiss.ch



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

IM\_JW\_215\_315\_PRO\_2\_RU\_A6\_2418

## ⚠ Предупреждения

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть аллергическая предрасположенность к компонентам, входящим в состав материала.

## Порядок надевания:

Рекомендуется надевать компрессионный трикотаж утром до появления отеков. Прежде чем приступить к надеванию изделия, проверьте, чтобы ваши руки были подготовлены: отсутствие колец на пальцах, аккуратно подстриженные ногти, отсутствие заусенцев.

1. Соберите изделие до пятки. Аккуратно натяните на ступню. Проверьте правильность расположения пятки.



2. Постепенно надевайте трикотажное изделие разглаживающими движениями



3. Аккуратно уберите складки при необходимости



4. Натяните изделие до талии (в том случае, если это колготки)



## Режим ношения:

Для профилактики отеков следует носить компрессионный трикотаж в течение дня, если иное не рекомендовано врачом.

Если Вы снимаете изделие в течение дня, рекомендуется надевать его снова после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении.

## Комплектность:

- ▶ чулки – 1 пара в упаковке, инструкция
- ▶ колготки – 1 штука в упаковке, инструкция

## Правила подбора:

Чтобы облегчить и упростить подбор необходимого размера трикотажного изделия специалисты B.Well Swiss рекомендуют пользоваться росто-весовой таблицей.

Росто-весовая таблица подбора размеров

Вес, кг	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Рост										
145	1		2		3		4		5	
150	1		2		3		4		5	
155	1		2		3		4		5	
160	1		2		3		4		5	
165	1		2		3		4		5	
170	1		2		3		4		5	
175	1		2		3		4		5	
180	1		2		3		4		5	

Компрессионный трикотаж B.Well rehab также можно подобрать, используя таблицу, основанную на индивидуальных измерениях.

Такие измерения лучше проводить с утра, до появления отеков.

Таблица измерений для подбора размеров колготок и чулок

Измерение, сантиметры	Размер ступни	Окружность самой узкой части голени над лодыжками	Окружность голени в самом широком месте	Окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)	Окружность талии	Длина от пола до ягодичной складки	t	g	G	c	b	a	A
1	до 23	до 20	до 33	до 56	до 65	до 72							
2	23-24	20-23	30-37	45-61	60-80	до 75							
3	24-26	23-26	33-40	50-64	70-90	до 78							
4	26-27	26-28	35-43	56-71	80-100	до 81							
5	от 27	от 27	от 42	от 64	от 100	до 83							

Для колготок маркировка размеров обозначена цветной полоской:

**1** – коричневый, **2** – зеленый, **3** – серый, **4** – розовый, **5** – голубой  
Для колготок существуют ограничения по окружности талии (t):

**1-3 размеры** – до 90 см; **4-5 размеры** – до 110 см.

## Состав:

Наименование изделия	Класс компрессии	Состав
Изделия медицинские компрессионные: Чулки JW-215*	I class, 18-22 мм рт. ст.	74% Полиамид 26% Эластан (Лайкра)
Изделия медицинские компрессионные: Колготки JW-315		75% Полиамид 25% Эластан (Лайкра)

\* содержит силикон