

Инструкция по применению изделий медицинских компрессионных

B.Well[®]
rehab

Серия CARE

Компрессионный трикотаж B.Well rehab серии CARE используется, чтобы избежать и предупредить развитие варикозного заболевания вен во время беременности.

Ассортимент компрессионного трикотажа B.Well rehab серии CARE включает в себя компрессионный трикотаж для беременных I class / II class (колготки).

Ношение компрессионного трикотажа B.Well rehab способствует улучшению кровотока и уменьшению отеков ног. Механизм действия компрессионного трикотажа основан на распределенном (градуированном) давлении: максимальное давление в области щиколотки 18-22 мм рт. ст. (I class), 22-29 мм рт. ст. (II class) уменьшается в области голени, в области бедер компрессия минимальна. Компрессионный трикотаж оказывает воздействие на поверхностные вены и предотвращает развитие отеков.

Все изделия проходят тест Natra, подтверждающий соответствие распределенного давления физиологическому.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КОМПРЕССИОННОГО ТРИКОТАЖА СЕРИИ CARE:

Компрессионный трикотаж для беременных • I CLASS • 18-22 мм рт. ст.

- ▶ Профилактика хронической венозной недостаточности при беременности
- ▶ Начальная стадия хронической венозной недостаточности
- ▶ Отеки ног к концу дня
- ▶ Синдром «тяжелых ног»
- ▶ Большая нагрузка на нижние конечности

Компрессионный трикотаж для беременных • II CLASS • 22-29 мм рт. ст.

- ▶ Хроническая венозная недостаточность у беременных
- ▶ Выраженные отеки ног, сохраняющиеся после ночного отдыха
- ▶ Расширенные поверхностные вены и множественные сосудистые звездочки
- ▶ Большая нагрузка на нижние конечности
- ▶ Профилактика тромбоза глубоких вен

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ▶ Септическое заболевание вен и мягких тканей
- ▶ Сердечно-легочная недостаточность
- ▶ Трофические язвы нижних конечностей

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть аллергическая предрасположенность к компонентам, входящим в состав материала.

Перед покупкой компрессионного трикотажа II CLASS рекомендуется консультация врача.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ

Рекомендуется надевать компрессионный трикотаж утром до появления отеков.

Изделие рекомендуется надевать в перчатках, или же, прежде чем приступить к надеванию изделия, проверьте, чтобы ваши руки были подготовлены (отсутствие колец на пальцах, аккуратно подстриженные ногти, отсутствие заусенцев на пальцах), смажьте руки кремом.

1. Соберите изделие до пятки. Аккуратно натяните на ступню. Проверьте правильность расположения пятки.



2. Постепенно надевайте трикотажное изделие разглаживающими движениями



3. Аккуратно уберите складки при необходимости



4. Натяните изделие до талии (в том случае, если это колготки)



Расшифровка символов, применяемых на упаковке:



Знак соответствия. На продукцию оформлена декларация о соответствии



Сертификация CE



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами



Модель Производитель



Код партии

B.Well Swiss AG, Gartenstrasse 9a, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

Би.Велл Свисс АГ, Гартенштрассе 9а, CH-9435 Хeerбругг, Швейцария

C.R.E. Calzifici Riuniti Eli S.r.l., 21052 Busto Arsizio (VA), Via Palermo, 36, Italy

К.Р.И. Калцифици Риунити Элли С.Р.Л. 21052 Бусто Арсицио (Варезе).

Папермо, 36, Италия

Сделано в Италии

www.bwell-swiss.ch



Инструкция по применению изделий медицинских компрессионных

B.Well
rehab

Серия CARE

РЕЖИМ НОШЕНИЯ

Для профилактики отеков следует носить компрессионный трикотаж в течение дня, если иное не рекомендовано врачом.

РАЗМЕРЫ

Чтобы облегчить и упростить подбор необходимого размера специалисты B.Well Swiss разработали росто-весовую таблицу размеров, по которой можно в большинстве случаев подобрать правильный размер. В ситуациях, когда невозможно воспользоваться данной таблицей, а также в пограничных случаях рекомендуется для точного выбора использовать таблицу подбора размеров, основанную на измерениях. Такие измерения лучше проводить с утра, до появления отеков.


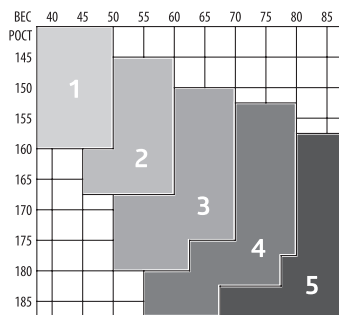


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ ДЛЯ ЖЕНСКИХ КОЛГОТОК, ЧУЛОК, ГОЛЬФОВ:

Измерение: сантиметры	Размер ступни	Окружность щиколотки	Окружность икры	Окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)	Длина от пола до ягодичной складки
РАЗМЕР	a	b	c	d	A-D
1	до 23	до 20	до 28	до 57	до 72
2	23-24	20-23	30-37	45-62	до 75
3	24-26	23-26	33-40	49-67	до 78
4	26-27	26-29	35-43	53-72	до 81
5	от 27	от 29	от 37	от 56	до 83

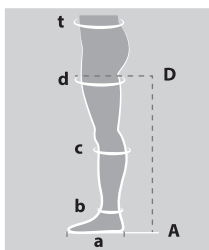

Маркировка размера на изделиях цветной полоской:

1 – голубой, 2 – зеленый, 3 – желтый, 4 – красный, 5 – синий

СОСТАВ:

Наименование изделия	Класс компрессии	Состав
Колготки для беременных, арт. JW-316	I CLASS, 18-22 мм рт. ст.	73% Полиамид · 27% Эластан
Колготки для беременных, арт. JW-327	II CLASS, 22-29 мм рт. ст.	74% Полиамид · 26% Эластан

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Стирайте компрессионное изделие только вручную.
- Температура стирки не должна превышать 30°C.
- Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки.
- Запрещается гладить изделие.
- Сушите компрессионное изделие в прохладном месте, избегая нагревательных приборов.

Стирайте трикотаж каждый день для сохранности медицинских свойств изделия. Используйте в качестве моющих средств мыло или специальные шампуни для компрессионного трикотажа.

ХРАНЕНИЕ: в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ: вместе с бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 6 месяцев

на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).

Гарантийными случаями не являются:

- ▶ механические повреждения (включая случайные)
- ▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- ▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- ▶ несанкционированные внесения изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку.

Дата производства изделия: указана на этикетке в номере партии «Lot»: последние шесть цифр обозначают год и месяц производства.

Соответствие стандартам: Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке. Декларация о соответствии