

Вы можете приобрести стельки B.Well rehab разных серий:

PRO

Профессиональный подход к профилактике плоскостопия

Уменьшают нагрузку на стопу, повышают комфорт при ходьбе

MED

Современный метод лечения проблем стопы

Поддерживают нормальную анатомическую форму сводов стопы, разгружают проблемные зоны

ORTHO

Помощь при хронических проблемах стопы

Обеспечивают поддержку сводов стопы, корректируют положение тазобедренных, коленных, голеностопных суставов и позвоночника

CARE

Нежная забота о стопе

Защищают и ухаживают за проблемными зонами стопы



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

www.bwell-swiss.ru

B.Well 
rehab

B.Well Swiss AG,
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Производитель

Би.Велл Свисс АГ

Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Место производства:

Пиньян Моллито Фут Кеа Продактс Ко., Лтд.,

104 Нэшнл Хайвэй, Компрехенсив Парк,

Лайт Индастриал Бэйс, Цанцюань Таун,

Пиньян, Китай

Сделано в Китае

Бесплатная горячая линия

для Москвы: **(495) 645-8701**

для регионов: **8 800 200 3322**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

B.Well 
rehab

Изделия протезно-ортопедические:

Стельки ортопедические **REF FW-606**
DUO active

Серия MED: современный метод лечения стопы

Ортопедические стельки DUO active разработаны для тех, кто стремится быть в движении. Мягкие и удобные стельки поддерживают поперечные и продольные своды стоп, выравнивают биодинамику шага при гиперпронации стопы:

- ▶ смягчают и амортизируют ударные нагрузки
- ▶ динамично распределяют нагрузки по стопе

Ортопедические стельки DUO active подходят для всех типов спортивной, закрытой повседневной обуви с высотой каблука не более 4 см.

Назначение:

- ▶ стабилизируют и поддерживают своды стопы в движении и в покое
 - смягчают и амортизируют ударные нагрузки
 - динамично распределяют нагрузки по стопе
 - предупреждают травмы голеностопных и коленных суставов
- ▶ выравнивают биодинамику движения при гиперпронации стопы
- ▶ дают ощущение комфорта при беге, ходьбе, уменьшают усталость ног
- ▶ улучшают кровообращение стоп
- ▶ предупреждают развитие патологий опорно-двигательной системы
- ▶ повышают устойчивость при стоянии, беге, ходьбе
- ▶ рекомендуются при нефиксированном плоскостопии I-II степени
- ▶ предупреждают травмы голеностопных и коленных суставов

Особенности:

- ▶ инновационный каркас с X-зоной обеспечивает идеальный баланс между жесткой поддержкой сводов и динамической стабилизацией стопы во время движения
- ▶ покрытие из современного дышащего материала по mesh-технологии впитывает влагу, обладает противоскользящим эффектом, обеспечивает комфорт при непосредственном контакте с кожей

- ▶ метатарзальная зона разгружает пальцы стопы устанавливает их в анатомически правильное положение
- ▶ специальная область у основания 3-5 пальцев облегчает перекач по наружной части плюсны во время движения
- ▶ мягкая основа стельки гасит ударные нагрузки на стопу, усиливает ощущение комфорта при ношении
- ▶ высокие бортики и чашеобразное углубление в области пятки помогает правильно установить положение пяточных костей, вовлекает пятку в движение и снижает риск травм

Показания:

- ▶ продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I–II степени
- ▶ гиперпронация стопы
- ▶ профилактика травм нижних конечностей при занятиях спортом
- ▶ нагрузки на стопы (длительное пребывание на ногах, физические нагрузки, избыточный вес)
- ▶ заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- ▶ распластанность переднего отдела стоп
- ▶ беременность
- ▶ варикозная болезнь

Противопоказания:

Полая стопа III и более степени.

Предупреждения:

Индивидуальная непереносимость к компонентам, находящимся в составе стелек. Необходима консультация врача при дерматозах, открытых кровоточащих ранах, гнойных инфекционных воспалениях в области применения стелек. При появлении необычных симптомов или новых жалоб следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу

Правила подбора стелек:

Размер стельки подбирается по размеру стопы. Размер стопы указан обороте стельки

Порядок надевания:

Выберите свой размер и при необходимости обрежьте стельку по контуру ножницами. Стельку вложите в обувь. Проконтролируйте правильность расположения стельки в обуви

Режим ношения: профилактический, в течение дня

Комплектность: 1 пара в упаковке, инструкция

Материал: текстильное покрытие, мягкий полимер, пластиковая основа

Гарантийный срок: 6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия)

Гарантийными случаями не являются:

- ▶ механические повреждения (включая случайные), изменение цвета и фактуры ткани
- ▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- ▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации, хранения, ухода за изделием
- ▶ несанкционированные внесения изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Правила ухода:



Поверхность протирать влажной губкой



Не использовать машинную стирку, химически активные добавки



Сушить при температуре 18-20°C



вдалеке от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей



БЕРЕЧЬ
ОТ ДЕТЕЙ И
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

Беречь от домашних животных и детей

Избегать повреждения твердыми предметами.



Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов.

Избегать влаги при хранении.

Дата производства изделия

указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, затем четыре цифры – год производства

Соответствие стандартам:

продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2015/2899 от 12.03.2018

Расшифровка символов, применяемых на упаковке:



Соответствие Международным стандартам качества



Соответствует европейским нормам в области безопасного обращения химических веществ в составе продукции



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Производитель



Модель



Номер партии