

# B.Well

С заботой о каждом

Инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации)

## WA-C-M

Манжета конусная на плечо  
размера M

Для обхвата руки 22-32 см



7 640156 393743



 PRO

 MED

 TECHNO

## Уважаемый покупатель!

Компания V.Well благодарит Вас за покупку манжеты для автоматических приборов для измерения артериального давления и пульса.


## 1. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА МАНЖЕТЫ

Использование манжеты, не соответствующей размеру руки пользователя, искажает результат измерения артериального давления.

Если манжета мала, результат измерения будет завышен. Если велика – занижен. Компания V.Well предлагает манжеты двух основных типоразмеров (размер манжеты указан на обложке инструкции).


## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Манжета
2. Соединительная трубка.
3. Коннектор для соединения с автоматическим измерителем артериального давления.
4. Руководство по эксплуатации, совмещенное с гарантийным талоном.

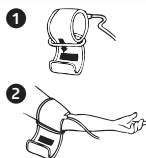

## 3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Проденьте конец манжеты через металлическое кольцо так, чтобы точка входа воздушной трубки в манжету располагалась с внешней стороны.
- 2 Проденьте руку в манжету так, чтобы воздушная трубка располагалась вдоль руки по направлению к Вашей ладони.
- 3 Расположите манжету на руке таким образом, чтобы ее нижний край находился на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба. Красная метка  $\Phi$  ARTERY MARK (Artery mark) должна находиться над локтевой ямкой.
- 4 Плотно, но не слишком туго, с учетом конусности руки затяните манжету, потянув за свободный конец.
- 5 Манжета должна плотно облегал руку, иначе результат измерения будет неправильным. Манжета должна находиться на уровне сердца. Не рекомендуется одевать манжету поверх одежды.
- 6 Положите руку ладонью вверх. Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался.
- 7 Спокойно посидите несколько минут перед измерением

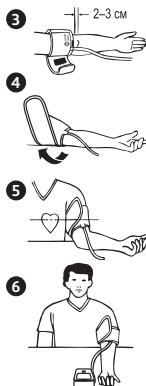


**⚠ ВАЖНО!** Измерения можно проводить не только на левой, но и на правой руке, но необходимо учитывать, что давление на разных руках – разное. В любом случае, для контроля и сопоставления результатов измерения уровня артериального давления, измерение необходимо проводить на одной и той же руке (на той, где артериальное давление выше).

Манжеты V.Well являются конусными и повторяют строение руки. Специальная анатомическая форма обеспечивает плотное прилегание манжеты к плечу, что способствует проведению точного измерения.

## 4. ХРАНЕНИЕ И УХОД

Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок. Оберегайте манжету и соединительную трубку от острых предметов.

Для поддержания гигиены (частое использование, длительное хранение, использование разными людьми) материал манжеты можно стирать, предварительно вынув пневмокамеру через специальное технологическое отверстие.

 Пневмокамеру стирать нельзя!  
Режим стирки материала манжеты – ручная, 30°C.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип манжеты	Описание
Манжета конусная на плечо размер M-L	Универсальная манжета для окружности руки 22-42 см
Манжета конусная на плечо размер M	Стандартная манжета для окружности руки 22-32 см
Условия эксплуатации	Температура: от + 10 °С до + 40 °С Влажность: от 15% до 90%
Условия хранения	Температура: от -10 °С до + 60 °С Влажность: от 15% до 90%

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель обеспечивает гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения манжеты. При обнаружении производственного дефекта в течение срока гарантии неисправная манжета будет заменена на новую бесплатно. Гарантийные обязательства действительны только при наличии кассового чека или полностью заполненного гарантийного талона с печатью торгового предприятия или центра технического обслуживания.

Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и № 471 ГК РФ и статьей № 19 п. 3 Закона «О защите прав потребителей» (с изменениями от 11 июня 2021 года). Гарантийный срок эксплуатации манжеты – 1 год.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы равен 3 годам.

### Соответствие стандартам

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4964 от 16.11.2018 г.

Манжеты к приборам для измерения артериального давления (код ОКПД 2 26.60.12.140) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» обязательной сертификации и декларированию не подлежат.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация возможна вместе с бытовыми отходами.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН B.Well

(заполняется торговым представителем)

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Печать торгового представителя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_ Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(заполняется службой сервиса)

Наименование прибора: \_\_\_\_\_

Дата обращения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Характер неисправности \_\_\_\_\_

Выполнение работы: \_\_\_\_\_

Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать на сайте [www.bwell-swiss.ru](http://www.bwell-swiss.ru).

Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках настоящей гарантии, так и платному, можно получить в авторизованном сервисном центре или по телефону бесплатной горячей линии по России **8-800-200-33-22**.

Политика компании B.Well Swiss предусматривает постоянное совершенствование продукции. В связи с этим компания оставляет за собой право вносить полные или частичные изменения в продукцию без предварительного уведомления и в соответствии с производственными требованиями.

*Дата изготовления указана в номере LOT данной инструкции по эксплуатации. Первая и вторая цифры (WW) – неделя производства, третья и четвертая (YY) – год производства.*

**LOT** : WWYY

Производитель: **B.Well Swiss AG**  
(Би.Велл Свисс АГ), Швейцария  
Место производства: **Андон Хэлс Ко., Лтд.,**  
№3 Джинпинг Стрит, ИаАн Роуд,  
Нанкай Дистрикт Тианджин, 300190  
Китай

**Бесплатная горячая линия**

**8 800 200 33 22**

Официальный импортер, уполномоченная производителем организация, принимающая претензии: АО «Альфа-Медика»  
125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д. 3,  
пом. 1, эт. 4, офис 2402. [www.bwell-swiss.ru](http://www.bwell-swiss.ru)