

Бандаж на коленный сустав W-331

Серия PRO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж на коленный сустав, арт. W-331, предназначен для профилактики травм и заболеваний коленного сустава. Рекомендуется ношение бандажа при наличии факторов риска:

- ▶ нагрузках, переохлаждении
- ▶ после перенесенных травм или заболеваний
- ▶ при избыточном весе

Бандаж оказывает стабилизирующее и компрессионное воздействие на коленный сустав, способствуя улучшению кровообращения и снижению болевого синдрома.

Размер бандажа подбирается по окружности ноги под коленом

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для бандажей на основании статистических данных.

Размер бандажа	Размер (мужской)	Размер (женский)	Обхват под коленом
S	46-48	44-46	27-30 см
M	48-50	46-48	30-33 см
L	50-52	48-50	33-36 см
XL	52-54	50-52	36-40 см
XXL	более 54	52-54	40-44 см

Порядок надевания:

Бандаж надеть так, чтобы специальные вязаные вставки располагались в области коленного сустава.

Режим ношения:

Профилактический.

При подборе рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

Показания:

- ▶ профилактика травм при нагрузках
- ▶ уменьшение боли, отечности при травмах, растяжениях связок, ушибах
- ▶ профилактика развития и обострения заболеваний
- ▶ после перенесенных операций

Комплектность: бандаж

Состав: 40% биокерамик, 10% лайкра, 27% нейлон, 23% эластик

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы

не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги

Противопоказания: не выявлено

Предупреждения: если у Вас есть аллергия на компоненты, находящиеся в составе бандажа, проконсультируйтесь перед применением бандажа с врачом.

Внимание! Слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов или новых жалоб следует прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Правила ухода:

- ☞ Стирать вручную
- ☞ Температура не выше 30°C
- ☞ Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
- ☞ Химчистка запрещена
- ☞ Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
- ☞ Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Расшифровка символов с упаковки:



Знак соответствия Российским Стандартам



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Производитель



Модель

