

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Правила ухода:

-  Стирать вручную. Перед стиркой рекомендуется вынуть ребра жесткости
-  Температура не выше 30 °C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

## Расшифровка символов с упаковки:

-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель
-  Беречь от влаги
-  Беречь от солнечных лучей

 Температура применения от -40 °C до +40 °C

 Хранить при температуре от -20 °C до +50 °C

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.

Корсет ортопедический, полужесткий, арт. W-152, уменьшает острый и хронический болевые синдромы при травмах и заболеваниях позвоночника.

- ▶ Стабилизирует, разгружает пояснично-крестцовый отдел позвоночника
- ▶ Фиксирует позвоночник в физиологичном положении
- ▶ Уменьшает нагрузку на позвоночник
- ▶ Усиливает тонус паравerteбральных мышц спины

Поддерживающая спинка корсета высотой 25 см с ребрами жесткости повторяет анатомический изгиб позвоночника, усиливая стабилизирующий эффект. Система фиксирующих ремней позволяет регулировать степень воздействия и ограничить движения в позвоночнике, предупреждая появление резких болей в спине. Корсет незаметен под обычной одеждой, выполнен из гипоаллергенного воздухопроницаемого материала.

## Размер корсета подбирается по окружности талии и бедер

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для корсетов на основании статистических данных:

| Размер корсета | Размер (мужской) | Размер (женский) | Окружность талии | Окружность бедер |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| S              | 46-48            | 42-44            | 62-72 см         | 82-90 см         |
| M              | 48-50            | 46-48            | 72-82 см         | 91-99 см         |
| L              | 50-52            | 48-50            | 82-92 см         | 100-108 см       |
| XL             | 52-54            | 50-52            | 92-102 см        | 109-117 см       |
| XXL            | 54-56            | 52-54            | 102-112 см       | 118-126 см       |



Рекомендуется примерить корсет, особенно в пограничных случаях.

## Порядок надевания:

Пояс корсета застегивается при помощи застежек «Велкро». Степень воздействия на пояснично-крестцовый отдел регулируется при помощи системы фиксирующих ремней. Проверьте расположение ребер жесткости. Если у вас боли в нижнем отделе позвоночника, длинная часть ребер жесткости должна располагаться внизу. Если боли в поясничной области – переверните ребра вниз более короткой частью.

## Режим ношения:

По рекомендации врача или профилактический при возникновении болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

## Показания:

- ▶ уменьшает острый и хронический болевой синдромы при:
  - радикулите, люмбаго, люмбагии
  - корешковом синдроме
  - остеохондрозе
  - межпозвонковых грыжах
  - при смещениях позвонков
  - спондилоартрозе, спондилите, сакролите и других воспалительно-дегенеративных заболеваниях позвоночника
- ▶ рекомендуется после операций дискэктомии
- ▶ для профилактики травм и обострений заболеваний при нагрузках

**Комплектность:** корсет

**Состав:** 52% полиэстер, 11% хлопок, 7% нейлон, 10% полиуретановый поролон, 20% эластик, вкладные ребра жесткости из алюминиевого сплава

**Гарантийный срок:** 6 месяцев на медицинские свойства

## Противопоказания:

- ▶ диафрагмальные грыжи
- ▶ синдром портальной гипертензии

## Предупреждения:

при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе корсета, необходима предварительная консультация врача.

**Внимание!** Слишком плотное прилегание корсета может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия.

При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и немедленно обратиться к врачу.

**Срок годности/службы** не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «ЛОТ»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства

