

ИЗДЕЛИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ:

Корректор осанки W-131

для взрослых

B.Well 
rehab

Серия MED

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила ухода:

-  Стирать вручную. Перед стиркой рекомендуется вынуть ребра жесткости
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Расшифровка символов с упаковки:

-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель
-  Беречь от влаги
-  Беречь от солнечных лучей
-  Температура применения от -40°C до +40°C
-  Хранить при температуре от -20°C до +50°C

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.



www.bwell-swiss.ru

Корректор осанки, арт. W-131, предназначен для формирования правильного мышечно-суставного стереотипа осанки.

- ▶ Удерживает позвоночник в физиологичном положении
- ▶ Нормализует тонус мышц спины
- ▶ Снимает нагрузку с переднего опорного комплекса грудных позвонков
- ▶ Уменьшает болевой синдром

Корректор осанки оказывает дисциплинирующее действие, не вызывает мышечную гипотрофию. Пружинные вставки нормализуют тонус мышц. Корректор незаметен под обычной одеждой, выполнен из гипоаллергенного воздухопроницаемого материала.

Размер корректора подбирается по окружности грудной клетки (измеряется на уровне подмышечных впадин)

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для корректоров на основании статистических данных:

Размер корректора	Размер (мужской)	Размер (женский)	Окружность грудной клетки
S	44-46	42-44	79-87 см
M	46-48	46-48	87-93 см
L	48-50	48-50	93-102 см
XL	50-52	50-52	102-111 см
XXL	52-54	52-54	111-117 см



Рекомендуется примерить корректор, особенно в пограничных случаях.

Порядок надевания: корректор надеть по принципу рюкзака. Положение наплечных ремней зафиксировать при помощи хлястика на наружной части. Степень натяжения наплечных ремней можно регулировать.

Режим ношения: профилактический

- ▶ начинать с 1 - 1,5 часов
- ▶ в течение 2-х недель постепенно увеличивать время ношения до 6 часов
- ▶ в течение 2-х месяцев носить ежедневно на протяжении 4 - 6 часов
- ▶ постепенно в течение 2-х недель снизить время ношения до 1 - 1,5 часов

После 3-х месяцев ношения рекомендуется консультация у врача.

Показания:

- ▶ боли при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника
- ▶ нарушения осанки, сутулость, «вялая» спина
- ▶ искривления позвоночника в грудном отделе (кифоз, кифосколиоз, сколиоз)
- ▶ остеохондропатии позвоночника с болевым синдромом
- ▶ реабилитация после травм и операций в области грудного отдела позвоночника
- ▶ профилактика травм при остеопорозе с локализацией в области грудного отдела позвоночника

Комплектность: корректор

Состав: 13% полиэстер, 58% нейлон, 29% эластик, металлические пружинные вставки

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Противопоказания:

- ▶ диафрагмальные грыжи
- ▶ синдром портальной гипертензии

Предупреждения:

При наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе корректора, необходима консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание корректора может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов.

Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия.

При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и немедленно обратиться к врачу.

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства