







Бандаж на брюшную стенку W-422 медицинский, с двойной застежкой

Серия CARE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила ухода:

Перед стиркой рекомендуется застегнуть все застежки

-  Стирать вручную
-  Температура не выше 30 °C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Расшифровка символов с упаковки:

-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель
-  Беречь от влаги
-  Беречь от солнечных лучей
-  Температура применения от -40 °C до +40 °C
-  Хранить при температуре от -20 °C до +50 °C

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.

Бандаж на брюшную стенку, арт. W-422, предназначен для фиксации брюшной стенки после операций, применяется для восстановления в послеоперационном периоде, предотвращает осложнения, способствует формированию и заживлению послеоперационного рубца, в том числе и глубокого, мышечного.

- ▶ Снижает отек и боль после операции
- ▶ Улучшает тонус мышц передней брюшной стенки
- ▶ Способствует заживлению послеоперационных швов
- ▶ Позволяет осуществить раннюю мобилизацию (активизацию) пациента
- ▶ Облегчает движения в послеоперационном периоде

Специальный материал, эластичный в продольном направлении и жесткий в поперечном, обеспечивает компрессионный и поддерживающий эффект.

Гибкое ребро жесткости препятствует скручиванию бандажа при движении.

Специальная технология плетения нитей позволяет обеспечить воздухопроницаемость и гигроскопичность бандажа, что отвечает основным требованиям, предъявляемым к перевязочному материалу.

Высота спинки бандажа составляет 27 см.

Мягкий клапан защищает рану от случайных воздействий.

Два лепестка застежки позволяют с разной силой затянуть верхнюю и нижнюю панель бандажа, подходит в том числе для нестандартной фигуры

Размер бандажа подбирается по окружности талии

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствия размеров для бандажей на основании статистических данных:

Размер бандажа	Размер	Окружность талии
S	42-44	62-72 см
M	46-48	72-82 см
L	48-50	82-92 см
XL	50-52	92-102 см
XXL	52-54	102-112 см



Порядок надевания:

Бандаж рекомендуется надевать лежа. Степень компрессии регулируется при помощи застежек-липучек «Велкро».

Режим ношения:

Профилактический в течение дня, если иное не предписано врачом.

При подборе рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

Применяется для:

- ▶ восстановления после операций на брюшной полости и органах малого таза
- ▶ профилактики образования грыж
- ▶ профилактики ущемления вправимых грыж
- ▶ профилактики расхождения швов
- ▶ профилактики опущения органов брюшной полости
- ▶ реабилитации после пластических операций на передней брюшной стенке
- ▶ восстановления после кесарева сечения
- ▶ восстановления тонуса мышц и кожи после обычных родов

Комплектность: бандаж

Состав: 42% нейлон, 34% полиэстер, 24% эластан.

Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материалов

Предупреждения:

- ▶ при нарушении кожных покровов
- ▶ при беременности
- ▶ при наличии диафрагмальных грыж
- ▶ при невправимых грыжах брюшной стенки
- ▶ при синдроме портальной гипертензии
- ▶ при воспалении швов
- ▶ при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спастическими болями и вздутием живота

Необходима консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов.

Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

