

ИЗДЕЛИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ:
**Бандаж на лучезапястный
сустав W-245**

используется для фиксации и компрессии тканей.
регулируемый

B.Well 
rehab

Серия MED

Применяется при:

- ▶ Болевой синдром при травмах, ушибах, растяжениях связок
- ▶ При заболеваниях лучезапястного сустава (артриты, артрозы, артралгии, тендиниты, тендовагиниты)
- ▶ Профилактика травм и заболеваний лучезапястного сустава
- ▶ Профилактика осложнений после перенесенных травм
- ▶ Реабилитация после операций и жесткой иммобилизации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Размер универсальный

Порядок надевания: петля надевается на большой палец. Бандаж обматывается вокруг кисти руки и фиксируется с помощью застежек-липучек «Велкро». Металлическая пружинная вставка усиливает фиксацию.

Режим ношения: профилактический, если иное не предписано врачом.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материалов. При наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, констатирующие с кожей, необходима предварительная консультация врача

Предупреждения: При нарушении кожных покровов перед применением необходима консультация врача.

Внимание! Слишком плотное прилегание изделия может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатю кровеносных сосудов и нервов. При появлении необычных симптомов следует прекратить его использование и обратиться к врачу.

Комплектность: бандаж

Состав: 58% нейлон, 29% эластик, 13% полиэстер

Гарантийный срок:

6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Правила ухода: перед стиркой рекомендуется застегнуть все застежки



Стирать вручную



Температура не выше 30°C



Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине



Химчистка запрещена



Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки



Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Расшифровка символов с упаковки:



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Производитель



Модель



Беречь от влаги



Беречь от солнечных лучей

-40°C — 40°C

ПРИМЕНЕНИЕ

-20°C — 50°C

ХРАНЕНИЕ

Температура применения от -40 °C до +40 °C

Хранить при температуре от - 20 °C до + 50 °C



www.bwell-swiss.ru